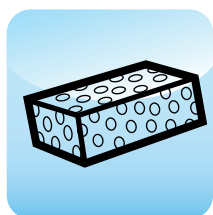
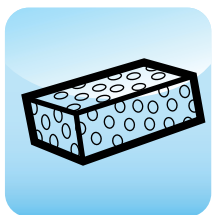


## Rengöring: Let's Relax


Let's Sing, Let's Shower, Let's Enjoy, Let's Frisbee, Let's Step

**Enkel rengöring:**

Rengör med diskmedel eller såpa i ljummet vatten  
Använd en mjuk svamp.

**Grundlig rengöring:**

Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit.

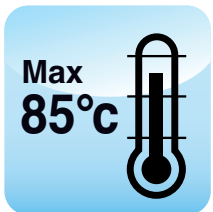**Dekontaminering:**

Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.